

3M™ Cavilon™

Langzeit-Hautschutz-Creme

Produktbeschreibung

3M™ Cavilon™ Langzeit-Hautschutz-Creme ist eine pH-neutrale, hypoallergene, reichhaltige Creme zum Schutz der Haut vor Körperflüssigkeiten. Die Creme bietet einen lang anhaltenden Schutz der Haut. Gleichzeitig spendet die Creme der Haut Feuchtigkeit und pflegt sie. Die Creme ermöglicht die Haftung von Pflastern und klebenden Verbänden.

Indikationen für die Anwendung

Schutz von gefährdeter Haut in Zusammenhang mit Inkontinenz und dazugehörigen Symptomen wie Jucken am After. Sie kann auch als feuchtigkeitsspendende und pflegende Creme für trockene Haut verwendet werden. Dieses Produkt kann bei intakter und geschädigter Haut, zum Beispiel im Zusammenhang mit Inkontinenz, verwendet werden.

Warnhinweise

NUR ZUR ÄUSSEREN ANWENDUNG. Kontakt mit den Augen vermeiden. Wenn sich der Hautzustand innerhalb von 7 Tagen verschlechtert bzw. nicht verbessert, sollte ein Arzt aufgesucht werden. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Verschlucken der Creme bitte einen Arzt aufsuchen. Nicht verwenden, wenn Allergien oder Überempfindlichkeiten gegen einen der aufgeführten Inhaltsstoffe bekannt sind.

Cavilon Langzeit-Hautschutz-Creme ist nicht für die Anwendung bei Erkrankungen im Analbereich bestimmt.

Vorsichtsmaßnahmen

Cavilon Langzeit-Hautschutz-Creme kann die Klebkraft von klebenden Produkten erhöhen.

Anwendungshinweise

Die Haut vorsichtig reinigen. Eine dünne Schicht Cavilon Langzeit-Hautschutz-Creme auf den betroffenen Bereich auftragen. Falls notwendig, den Vorgang wiederholen. Wenn sich die Haut fettig anfühlt, wurde zu viel Creme aufgetragen.

Inhaltsstoffe:

Wasser (Aqua), Diisooctyladipat, Acrylatterpolymer,

Kokospalmenöl, PPG-15 Stearylether, Glycerin, Isopropylpalmitat, Weißöl (Paraffinum Liquidum), Trimethylsiloxysilicat, Paraffin, Dimethicon, Phenoxyethanol, Benzoessäure, Dehydroacetsäure, Magnesiumsulfat.

Lagerung/Haltbarkeit/Entsorgung

Es wird empfohlen, das Produkt bei Raumtemperatur aufzubewahren. Nicht einfrieren.

Vor übermäßiger Hitze und Feuchtigkeit schützen. Das Haltbarkeitsdatum ist auf jeder Packung aufgedruckt.

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an die Kundenberatung der Fresenius Kabi Deutschland GmbH unter der Rufnummer 0800 / 788 7070.

Erklärung der Symbole



Nicht mit Naturkautschuklatex gefertigt



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Chargenbezeichnung



Hersteller



Frei von Duftstoffen



Frei von Parabenen



Made in U.K. by



3M Health Care Ltd

3M House, Morley Street
Loughborough, LE11 1EP
United Kingdom
3M.com/Cavilon

©2014

3M und Cavilon sind eingetragene
Warenzeichen der 3M Company.

Vertrieb durch



**FRESENIUS
KABI**

DV-2063-0158-7/1214